



MEIKO Hijyen Döngüsü

1 Kirli bulaşıkların kabulü

- Temizlenen malzemelere eldivenle temas edin

0 Kullanım alanı

- Malzeme:** Yemek takımları, çatal-bıçaklar, bardaklar
- Malzeme:** Hasta bakım malzemeleri (sürgüler, ördekler vb.)
- Malzeme:** Kişisel koruyucu ekipman (solunum maskeleri, akciğer otomatikleri vb.)
- Personel:** Yemek hizmet personeli, hastalar, itfaiye ekipleri

2 Hazırlama, taşıma

- Eldivenlerle çalışın
- Çalışmaları hızlı ve güvenli bir biçimde yürütün
- Başka bir odaya geçiş halinde: Kapı kollarına temiz eller veya temiz eldivenlerle temas edin

5 Kurutma

- Elle parlatma yapmayın (bezler hijyen riski oluşturur); nemli durumdaki temizlenen malzemeleri üst üste istiflemeyin
- Damlatma ve kurutma rafı, kurutma kabini

6 Malzemelerin çıkarılması

- Temizlenen malzemelere temiz eller veya temiz eldivenlerle temas edin



Kirli taraf (siyah taraf)

Amaç: Çalışanların temizlenen malzemelerdeki olası kontaminasyonlara karşı korunması

Temiz taraf (beyaz taraf)

Amaç: Kullanıma hazırlanmış durumdaki temizlenen malzemelerin rekontaminasyona karşı korunması

3 Malzemelerin makineye yüklenmesi

- Eldivenlerle çalışın
- Malzemeleri doğru yerleştirin (kullanma kılavuzu uyarınca)
- Makinenin kapağını temiz ellerle veya temiz eldivenlerle açın/kapatın
- Kapattıktan sonra: Ellerinizi temizleyin, dezenfekte edin veya kullanılmış eldivenleri bertaraf edin
- El yıkama evyeleri, eldiven dispenseri, çöp kutusu

4 Temizleme ve dezenfeksiyon

- Başlatma düğmesini temiz ellerle veya temiz eldivenlerle işletin
- Makinedeki mesajları dikkate alın, gerekiyorsa temizlik kimyasalı doldurun

8 Depolama

- Malzemeler temiz ve kuru durumda tutulmalıdır; hijyen güvenliğini emniyete alın (gerekiyorsa paketleyin)
- Yeterli miktarda depolama rafı

7 Kontrol

- Temizlik bakımından gözle kontrol
- Sonuç olumsuzsa: Kaynağını tespit edin, servis ile iletişim kurun
- Temizlenen malzemelerin tipine bağlı olarak başka kontroller gerekli olabilir

İşaret açıklamaları:

- Elleçleme tavsiyesi
- Hijyen riski
- Planlama tavsiyesi



The clean solution